

DESCRIPCIÓN

Producto: Mascarilla reutilizable.

Referencia: MSK1309

Mantenimiento: Conservar dentro de su embalaje original en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

No usar lejía. Se aconseja lavar a 40°C.

Caducidad: La vida útil del producto es de 25 lavados.

Composición: 100% Poliéster. Posee una capa exterior con acabado antiviral y antibacteriano. Capa intermedia compuesta de un interlineado que mantiene un dosel armado para mantener la forma de la mascarilla para una mejor respiración y de un filtro TNT con alto nivel de protección. Capa interior con un tratamiento antibacteriano para evitar la proliferación de virus y controlar el olor, con termoregulación inteligente y tecnología dinámica de evaporación y refrigeración.



USO DE LA MASCARILLA

Lávate las manos con agua y jabón o bien con un desinfectante a base de alcohol.

Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda.

Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla asegurándote de que no hay espacios entre tu cara y la mascarilla.



Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cuando sea el momento de quitártela hazlo por detrás, sin tocar la parte delantera y métela directamente a la lavadora. Lávate las manos a continuación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Mascarilla reutilizable.
- 3 capas de protección.
- Clip nasal ajustable.
- Dos bandas elásticas de ajuste rápido.
- Se ajusta a cualquier tipo de rostro.
- Puede usarla para cubrir la mayoría de las mascarillas medicas FFP1, FFP2, FFP3.
- No crea resistencia microbiana.
- Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) del 93.4%.
- Respirabilidad pa/CM2 <20 (LQ).
- Eficacia de 25 lavados sin perder características.
- Certificado el lavado a 60C.
- Sensibilidad cutánea. Clasificado como no irritante.
- Termoregulación inteligente y tecnología dinámica de evaporación y refrigeración.
- Actividad bactericida y fungicida.
- No tóxico, seguro y biocompatible.

Advertencia: este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario.



Bolsa

Alto: 16 cm.
Ancho: 15 cm.

Contenido: 1 mascarilla

USO DE LA MASCARILLA

Lávate las manos con agua y jabón o bien con un desinfectante a base de alcohol.

Cámbiate de mascarilla tan pronto como esté húmeda.

Cúbrete la boca y la nariz con la mascarilla asegurándote de que no hay espacios entre tu cara y la mascarilla.



Evita tocar la mascarilla mientras la usas. Si lo haces, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

Cuando sea el momento de quitártela hazlo por detrás, sin tocar la parte delantera y métela directamente a la lavadora. Lávate las manos a continuación.